

BRUGSANVISNING

Deculeg udfoldes og samles efter anvisningen, der er påtrykt på indersiden, og er herefter klar til brug.

Opmærksomhedspunkter

Som patient skal du være opmærksom på følgende:

1. Benet er eleveret til over hjertehøjde for optimal reducere af hævelse.
2. Benet skal være eleveret efter sundhedspersonalets anvisninger ved konsultation.
3. Patienten bør lave venepumpeøvelser for at hjælpe blodet med tilbageløb til hjertet.
4. Venempumpning opnås ved at bevæge foden frem og tilbage i et kontrolleret flow ved at vippe fodleddet.

Håndtering af produktet

Produktet skal kasseres hvis synligt defekt eller ved skader som kan svække designet.

Når behovet for elevation ophører, bortskaffes Deculeg som papaffald.

Produktet bør bortskaffes efter endt patientforløb.

Produktet må ikke genanvendes.

Se hvordan
du samler
Deculeg her:



DECULEG®

ELEVATION

Hjælpemiddel til elevation

Deculeg er et hjælpemiddel, som samles til en stabil benstøtte.

Deculeg er let at tilgå for sundhedspersonale på hospitalet og for patienter i eget hjem.



ELEVATION

Fordele

- Alle hygiejnekrav opfyldt – alle vil kunne tilbydes Deculeg uanset krav om isolation mm.
- Deculeg er elevation med formindsket risiko for trykskader
- Deculeg kan anvendes til flere patientkategorier – benfrakturer, armfrakturer, høstning af hud i plastikkirurgi, ved anlæggelse af blokader i baglår
- Let at anvende selv i vanskelige positioner, da Deculeg er let flytbar og derfor kan omroteres til den position man ønsker
- Kan gives med patienten hjem, og derved gøre elevation nemt og trygt for patienten i eget hjem – og giver derfor mulighed for korrekt elevation i hjemmet
- Engangsprodukt med fokus på miljø
- Konstrueret så hælen er fri. Bløddele såsom læggen tager det største tryk, hvorved risiko for trykskader minimeres

Specifikationer

- Vejer kun 365 g
- Ingen tunge løft
- Tager 15 sekunder at samle
- Kan opbevares som lagervare på afdelingen – står i dispenserkske med låg
- Kan let gøres komfortabel med vilkårlig pude
- CE-godkendt
- Bedre arbejdsmiljø – ingen tunge løft
- Kan recirkuleres efter endt brug (fremstillet af 80% genbrugspap samt udelukkende brug af vand-baseret farve og lak)
- Når udfoldet, har Deculeg fast højde, som ikke skal justeres

